


C3 *Diseño anatomico Una esterna ayuda, en la que usted puede confiar*

El **C3** ofrece a los hombres una fácil opción para lograr el control de la incontinencia

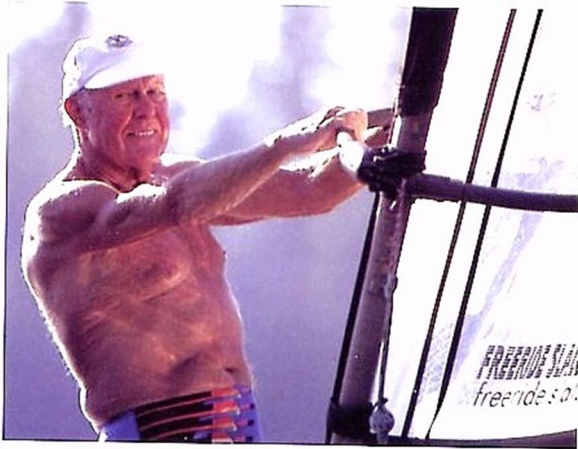

Comfort | Confor con C3

El diseño filigrana y la banda elástica de C3 reducen al mínimo la fuerza radial que actúa sobre el pene. El material seleccionado garantiza un uso cómodo. Una suave espuma envuelta en un plástico blando.

Disponible en dos tamaños para un ajuste personalizado.

Control | Control con C3

Contiene un cojín suave en la uretra. La pérdida incontrolada e involuntaria de la orina es detenida. El flujo normal de la sangre en el pene no cambia.

Confidence | Confianza con C3

El C3 está diseñado de modo que apenas se nota. Un cierre elástico del velcro sostiene la abrazadera en su posición sin deslizarse.

Le permite que vida cotidiana transcurra normalmente, incluidas las actividades deportivas sin tener que preocuparse constantemente de la incontinencia y de la higiene.

La abrazadera reutilizable tiene un precio razonable. Se debe cambiar a intervalos regulares. Los costos son mas bajos que los de las compresas y otras ayudas de absorción.

Fácil y rápida de manejar

El pene se coloca en la apertura de la abrazadera. El extremo corto debe colocarse de modo que la almohadilla de espuma presione desde abajo sobre la uretra. Después fije la abrazadera con la cinta del velcro, – pero no demasiado apretado (ver dibujo).



La presión puede regularse con la cinta de velcro.

La abrazadera del pene dispone de dos tamaños. Puede encontrar el tamaño adecuado para ello midiéndose el perímetro del pene con una cinta métrica flexible.

Medir a temperatura ambiente normal y con una temperatura normal del cuerpo. El perímetro del pene no se debe medir después del baño o después de la ducha.

Recomendaciones para la medida correcta:

1. Utilice una cinta métrica flexible.
2. Mida su pene en el estado normal, no en erección.
3. Coloque la cinta métrica alrededor del pene a una distancia de 2 cm del cuerpo.
4. Para no ponerselo muy fuerte mida correctamente el perímetro del pene.
5. Anote sus medidas correctas para hacer su pedido:

Regulares: desde 6 hasta 10 cm perímetro del pene

Grandes: desde 10 hasta 14 cm perímetro del pene

El C3 será por supuesto empaquetado y enviado con discreción.

C₃

Ayuda para la incontinencia del hombre



Distribuido en todo Europa por:



Waffenschmiedweg 30a | 86911 Diessen
Germany

Tel.: +49 (0)8807-91138

Fax: +49 (0) 8807-940899

Internet: www.mtm-med.com

Fabricante:



Redmond WA 98052 | USA

US Patent Number 5.184.629

C₃

Ayuda para la incontinencia del hombre



Una buena decisión que le ofrece el confort, el control y la confianza.



&



C₃

Ayuda para la incontinencia del hombre

Diseno anatomico

Una externa ayuda,

en la que usted puede confiar

Como ayuarse a si mismo encontra de la incontinencia



(Comfort) como Confor
(Control) como Control
(Confidence) como Confianza

