




C3 – Die Penisklemme mit den 3 C

(C**o**mfort) wie Komfort, (C**o**ntr**o**l) wie Kontrolle, (C**o**n**f**idence) wie Vertrauen

So ermitteln Sie Ihre C3-Größe

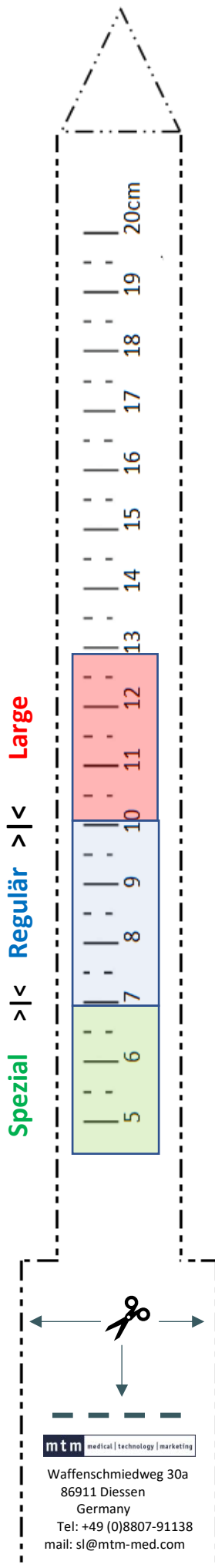


Ausdrucken

Drucken Sie diese Seite in **Originalgröße (100%)** aus.



Ausschneiden

Schneiden Sie das skizzierte Maßband entlang der gestrichelten Linie aus und den Schlitz an der gekennzeichneten Stelle ein.

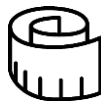

Maß nehmen

Legen Sie das Maßband ungefähr 1-2 cm von der Peniswurzel um Ihren Penis entfernt und stecken Sie das Ende des Maßbandes durch den Schlitz.



Größe bestimmen

Lesen Sie nun Ihr Messergebnis:

bis 7 cm = Spezial
 ab 7-10 cm = Regulär
 ab 10 cm = Large

Bitte rufen Sie uns an – Tel: +49 (0)8807-91138
Wir beraten Sie gerne.

mtm medical | technology | marketing

Waffenschmiedweg 30a
 86911 Diessen
 Germany
 Tel: +49 (0)8807-91138
 mail: sl@mtm-med.com